

Dräger DrugTest® 5000

Система оперативного тестирования на наркотики

Без пипеток, капель и секундомера:
Dräger DrugTest® 5000 быстро и просто отбирает образец слюны, который немедленно анализируется с получением точного результата на месте.



ST-247-2008

ОТБОР И АНАЛИЗ ОБРАЗЦА В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

Аналитическая система тестирования на наркотики Dräger DrugTest 5000 состоит из устройства отбора образцов (тест-комплекта) Dräger DrugTest 5000 Test Kit и анализатора Dräger DrugTest 5000 Analyzer, поэтому у вас все под рукой для первичной оценки на месте.

БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ ОТБОР ОБРАЗЦОВ СЛЮНЫ

Мгновенная готовность к работе

Благодаря тест-комплекту Dräger DrugTest 5000 система отбора образцов всегда наготове. Хотите проверить подозреваемого? Просто снимите защитную крышку и передайте тест-кассету проверяемому.

Гигиенично и безболезненно: отбор образцов без проб крови

Проверяемый перемещает верхнюю часть коллектора во рту из стороны в сторону между щекой и десной до индикации об отборе достаточного количества образца. Обычно это занимает менее минуты и никогда более четырех. Затем он возвращает вам тест-кассету – вы не контактируете с образцом слюны.

Синий цвет – отбор завершен

Dräger DrugTest 5000 автоматически сигнализирует о завершении отбора образца: после сбора достаточного количества слюны встроенный индикатор становится синим. Затем вы просто вставляете тест-кассету с картриджем пробоподготовки в анализатор Dräger DrugTest 5000 Analyzer.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА DRÄGER DRUGTEST® 5000 TEST KIT:

- высокая степень совпадения с результатами анализа образцов крови и пределы обнаружения, актуальные для Германии (подтверждено полевыми испытаниями Немецкого университета полиции)
- исключительно низкий предел обнаружения для ТНС как основного активного вещества каннабиноидов
- четкое отображение результатов
- гигиеничный отбор образцов и анализ
- высокая степень одобрения пользователями и проверяемыми
- простая процедура – даже при работе в перчатках



ST-13214-2007

Анализатор Dräger DrugTest 5000 Analyzer – отбор образцов и немедленный анализ



D-31774-2011

Тест-комплект Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit:
простой, быстрый, надежный и безопасный способ проверки на наркотики

АНАЛИЗАТОР DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER



Удобная ручка для переноски
легко переносится одной рукой –
даже без сумки

Цветной дисплей с подсветкой
удобная работа с меню и хорошее качество изображения даже в условиях слабой освещенности

Трехкнопочное управление

Прочный корпус
рассчитан на работу в суровых внешних условиях

ST-13284-2/007

Большой приемный порт аналитической камеры
тест выполняется автоматически, без вмешательства пользователя

- наличие различных конфигураций (возможность одновременного выявления нескольких веществ в зависимости от исполнения тест-комплектов)
- возможность эксплуатации при температуре от 4°C до 40°C
- возможность хранения в оригинальной упаковке при температуре до 30°C

НЕМЕДЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ

Вставьте тест-кассету с картриджем, запустите – готово!

Анализ образца слюны может выполняться сразу же после отбора. Просто вставьте тест-кассету с картриджем пробоподготовки в анализатор, и начнется анализ.

Простое и безопасное обращение – даже в неблагоприятных условиях

Даже в спешке: для управления анализатором вам понадобятся всего три кнопки. Прибор управляется через меню. Просто следуйте текстовым инструкциям на дисплее.

Быстро и удобно: результат всего за несколько минут

После включения прибора анализ выполняется автоматически. Это освобождает ваши руки и голову, например, для того, чтобы уделить внимание проверяемому. Через несколько минут результат анализа автоматически выводится на экран.

Цветной дисплей с хорошим качеством изображения

Цветной дисплей снабжен подсветкой, поэтому вы сможете просматривать информацию даже в условиях плохой видимости. Текст на дисплее хорошо различим даже на удалении и под острым углом зрения.

Однозначные результаты измерения не требуют интерпретации

Результаты измерения выводятся на дисплей в понятном текстовом виде, поэтому возможность неправильного истолкования исключена.



D-52606-2012

Анализатор Dräger DrugTest 5000® Analyzer с принтером Dräger Mobile Printer, тест-комплект и сумкой для переноски (включая кабель для питания от сети автомобиля 12 В)



ST-84-04-2006

Портативный принтер Dräger Mobile Printer



ST-3451-2003

Компактная клавиатура



ST-13211-2007

Транспортировочный кейс

Анализ образцов в любом месте

Вы можете работать от сети 230 В или от автомобильной сети 12 В, а благодаря встроенной аккумуляторной батарее не зависите от внешнего электроснабжения и готовы к анализу в любом месте и в любое время.

Сохранение 500 результатов анализа и простое управление данными

Встроенная память анализатора позволяет сохранить до 500 результатов анализа, включая дату и время. Клавиатура или сканер штрихкода позволяют вводить дополнительную информацию к анализу. Благодаря портативному принтеру Dräger Mobile Printer можно распечатать

результаты прямо на месте. Данные для документирования можно передавать на ПК через USB-интерфейс.

Небольшой вес (4,5 кг) облегчает транспортировку

Переноска анализатора не составит труда. Для простой и безопасной транспортировки прибора и принадлежностей Dräger предлагает сумку для переноски или прочный транспортировочный кейс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER:

– встроенная функция самодиагностики: не требуется калибровка каждые 6 месяцев


– богатый ассортимент принадлежностей (например, сумка для переноски, зарядное устройство или компактная клавиатура)

СИСТЕМА ОБНАРУЖИВАЕТ РЯД ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЯ:

- амфетамины
- бензодиазепины
- дельта-9-тетрагидроканнабинол (THC)
- кокаин
- метамфетамины
- опиаты
- метадон


DRÄGER DRUGTEST® 5000

ST-319-2008

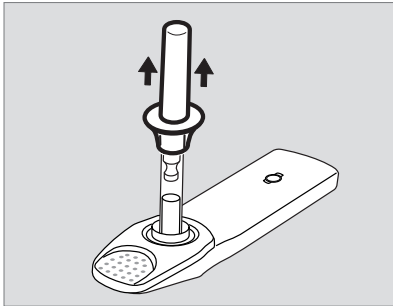


- Снимите защитную крышку
- Вручите тест-кассету проверяемому.

D-4780-2011

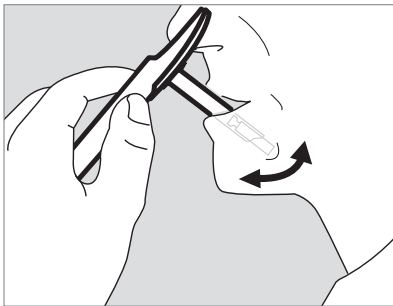

- Проверяемый перемещает коллектор во рту из стороны в сторону до тех пор, пока индикатор не станет синим.

D-4779-2011

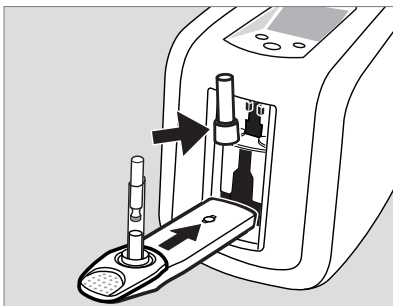

- Вставьте тест-кассету с картриджем пробоподготовки в анализатор. Закройте дверцу. Анализ начнется автоматически.
- Через несколько минут на экране появится результат

ТЕСТ-КОМПЛЕКТ DRÄGER DRUGTEST® 5000 TEST KIT



Dräger SSK 5000:

для обнаружения наркотиков на поверхности или в веществах

Вы хотите проверить на наличие наркотиков руль автомобиля или содержимое подозрительного пакета? Просто возьмите пробу с помощью пробоотборного устройства Dräger SSK 5000 и перенесите ее в коллектор тест-комплекта Dräger DrugTest 5000 Test Kit. Затем вы можете исследовать пробу в анализаторе Dräger DrugTest 5000 Analyzer.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	12 В пост. тока (от прилагаемого блока питания)
Потребление тока	типичное 3 А
Габаритные размеры (ДхВхШ)	200 x 260 x 250 мм
Масса	4,5 кг
Температура	при эксплуатации: 4°C ... 40°C при хранении/транспортировке: -20 °C ... +60 °C отн. влажность: 5 % ... 95 % (без конденсации)
Интерфейсы	оптический для принтера, PS/2, USB Slave
Длительность одного измерения	зависит от используемого тест-комплекта (типичная < 9 минут) опционально: анализ за < 5 минут при повышении порогового значения THC до 25 нг/мл (после обновления программного обеспечения прибора)
Емкость памяти	500 записей или измерений

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

	Кол-во в упаковке	Код заказа
Анализатор Dräger DrugTest 5000	1 анализатор, вкл. блок питания	83 19 900
Тест-комплект Dräger DrugTest 5000 Test Kit COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP*	20 шт.	83 19 830
Тест-комплект Dräger DrugTest 5000 Test-Kit COC-OPI-THC-AMP-MAMP*	20 шт.	83 21 280
Тест-комплект Dräger DrugTest 5000 Test-Kit COC-OPI*	20 шт.	83 19 990
Тест-комплект Dräger DrugTest 5000 Test-Kit COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD*	20 шт.	83 23 156
Dräger SSK 5000	20 шт.	83 20 490
Компактная клавиатура, немецкая раскладка (QWERTZ)	1	83 15 095
Компактная клавиатура, английская раскладка (QWERTY)	1	83 15 497
Компактная клавиатура, французская раскладка (AZERTY)	1	83 15 142
Сканер штрих-кода	1	AG 02 491
Портативный принтер Dräger Mobile Printer	1	83 19 310
Транспортировочный кейс для анализатора DrugTest 5000 Analyzer и принадлежностей	1	83 22 675
Транспортировочный кейс для анализатора DrugTest 5000 Analyzer	1	83 19 925

*COC: Kokain – *OPI: Opiate – *BENZO: Benzodiazepine – *THC: Cannabis – *AMP: Amphetamin – *MAMP: Methamphetamine – *MTD: Methadon

ГОЛОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

РОССИЯ

ООО «Дрегер»
107061, Москва, Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б», 12 этаж
Тел. +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

Производитель:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
23560 Lübeck, Германия